

UV



**FRICITION
DES MAINS**

+ PRODUIT

**AGENT
FLUORESCENT**

BONNES PRATIQUES



Dossier produit disponible sur
www.exeol.fr

exeol training gel

Gel fluorescent

► Pour la formation au traitement hygiénique des mains par friction.

- exeol training gel permet d'évaluer la répartition homogène du gel sur la peau.



Mode d'emploi

Produit uniquement conçu pour la formation à l'hygiène des mains, à utiliser sur peau saine.

Sur mains propres et sèches, appliquer une quantité suffisante de gel pour maintenir les mains humides pendant 30 sec.

Poursuivre la friction jusqu'au séchage complet des mains. Ne pas rincer.

En condition d'obscurité, placer les mains sous le faisceau d'une lampe UV et contrôler l'efficacité de la technique de répartition du gel (zones sombres = zones oubliées).

Présentations commerciales

- Carton 6 x 300mL pompe : EXS0086

Ingrédients	Caractéristiques
ALCOHOL, ISOPROPYL ALCOHOL, GLYCEROL, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, TRIISOPROPANOLAMINE, AQUA (EAU), PEG-4 CAPRYLIC/CAPRIC GLYCERIDES, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, DIETHYLAMINOMETHYLCOUMARIN, PANTHENOL.	• pH : 6 - 7 • Parfum : Non parfumé • Couleur : Incolore

Sodel
190 rue René Barthélemy
14100 Lisieux, France.
TEL: +33 (0)2 31 31 10 50
www.exeol.fr

SANTÉ
exeol

UV



exeol training gel

Gel fluorescent

► Pour la formation au traitement hygiénique des mains par friction.



FRICION
DES MAINS



Sur mains propres et sèches, appliquer une quantité suffisante de gel pour maintenir les mains humides pendant 30 sec.



Frictionner les mains et poignets en suivant toutes les étapes illustrées ci-dessous :



1 Friction paume contre paume.



2 Friction de la paume de la main droite sur le dos de la main gauche avec doigts entrelacés et vice-versa.



3 Friction de la paume contre paume avec doigts entrelacés.



4 Friction des dos des doigts dans la paume de la main opposée.



5 Friction circulaire d'un pouce, puis l'autre.



6 Friction de la pulpe des doigts et des ongles.



7 Friction des poignets.



8 Contrôlez la bonne application d'**exeol training gel** sur vos mains dans l'**exeol training box**.

Poursuivre la friction jusqu'au séchage complet des mains. Ne pas rincer.

Tutoriel **exeol training kit**



Dossier produit disponible
sur www.exeol.fr

Sodel
190 rue René Barthélemy
14100 Lisieux, France.
TEL: +33 (0)2 31 31 10 50
www.exeol.fr

FABRIQUÉ EN FRANCE

SANTÉ
exeol